



坐るをサポートする椅子 **児童から成人用**

レポ-Junior ・ レポ-NEXT ・ レポ-Seat



support
1

背中の張りベルト

ベルトの張り方で**骨盤の後傾を防ぎ**
腰から背中のS字カーブを楽に維持！



support
2

骨盤を左右から支えるパッド

骨盤を支えることで無理なく
背筋がピンッ！とします



体重の1/10もある頭を支えるのは大変

落ち着いて坐れるのはなぜ？


レポのサポート機能



support
3

座面奥行が調整できる

レポの座面は無段階調整
座面が前後に簡単に動かせます。

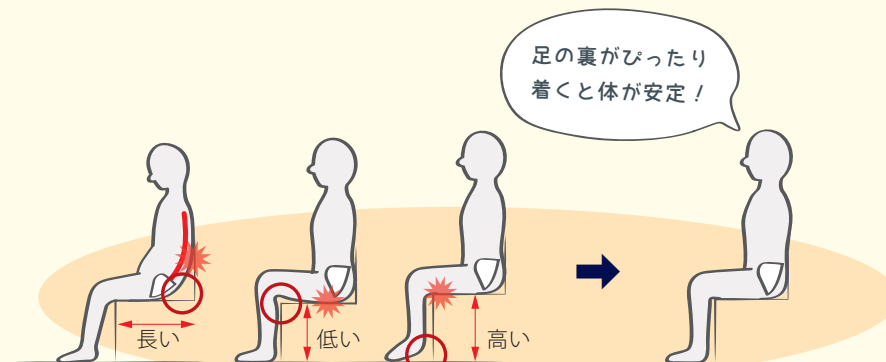

奥行きや高さが合わないと、腰や腿に負担が…

support
4

座面の高さが調整できる

各種成長対応脚部を使用
成長に応じて脚部のみの交換も可能
※一部例外有り

サポートに加え、レポが選ばれる 4つ の理由



point
1

工具がなくても大丈夫！

ノブボルトやマジックテープで
だれでも簡単に調整が可能

※体幹パッド(op)とレポ-Seatは一部
付属工具での取付及び調整があります。



point
2

学校や施設でも 使いやすい軽量フレーム

移動も楽な軽量フレームを使用

point
3

オプションが豊富

選べる脚部やポメル等の追加パッド類
各種ベルトテーブルなど

point
4

簡単に脱着できるカバー

背・座面・骨盤パッド・ポメル(オプション)
すべてのカバーが簡単に外せて洗濯も楽々



コラム

骨盤の適切な保持で子どもの生活が改善

作業療法士 佐藤 直

どうしてうまく坐れないの？

立って歩けても知的な遅れや発達障害を示す子どもの中には、椅子に坐るのが苦手な子がいます。椅子に坐ると、とたんに背中が丸くなり、お尻が前にずれ出すので、椅子や机に手を置いて姿勢を保持している子や、椅子からずり落ちてしまう子、立ち上がってしまう子もいます。また、足を組んだり、椅子の上であぐらをかくたりする子もいます。それで「姿勢が悪い!」と、たびたび注意を受けてしまいます。安定した坐位が継続できないのは、筋緊張の低さが考えられます。坐る時の様子を見てみると坐ったとたんに骨盤が後ろに倒れています。骨盤をを起こしておく力が弱いからです。



こうしたらいい!

感覚調整障害からくる注意集中力の弱さや視覚や知覚の問題などもありますが、まずは坐るための環境を整えてあげることが大事だと考えました。

骨盤を安定させることで、安定した坐位は得られます。骨盤を後ろから適切に支えるだけでなく側方からのサポートも大事です。さらに股が大きく開いてしまうのを防ぎ、足底が床にきちんと着けるようにすることも必要です。

こんなことが実現できる椅子が必要だと考え、“でく工房”に依頼しました。

手もうまく使えた



試作品を通園施設や特別支援学校(小学部から高等部まで)で試し、何度か改良を重ねました。

その結果、安定して坐ることができるようになり集中力も改善しました。手が上手に使えるようになった子や食事が上手になった子もいます。

椅子にうまく坐れないのは、その子の問題だけではなく、椅子がその子に合っていなかったからともいえます。椅子に、うまく坐るためには、骨盤を適切に支えることが大事だということを、この“レポ”を通して再認識しました。






合わせ方

- ① 成長対応脚部で座面高を合わせる
- ② 座面を前後し、奥行きを合わせる

- ③ 骨盤をパッドで左右から支える

- ④ 背張り調整ベルトで腰から背中のS字カーブを支える

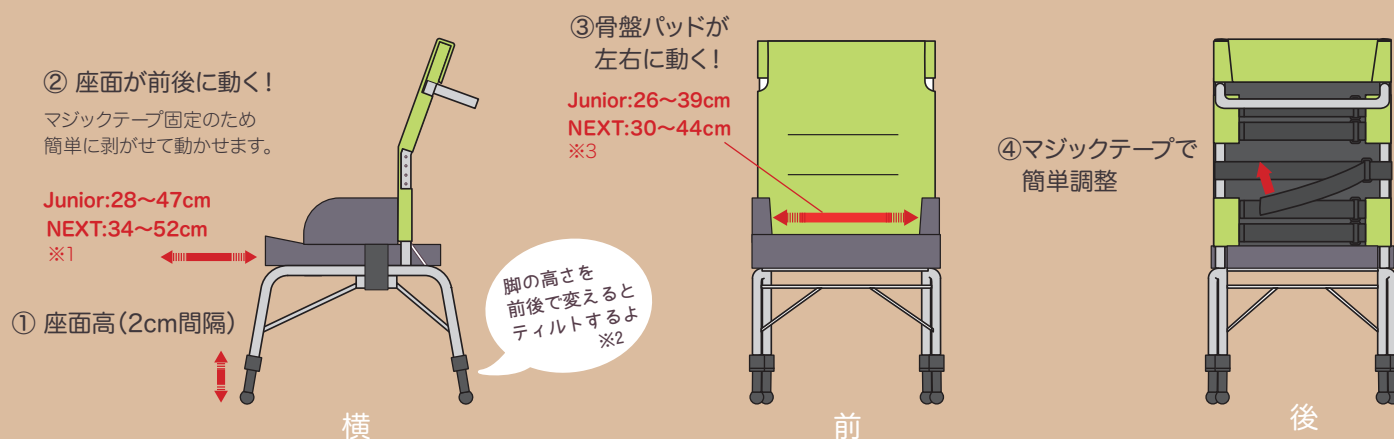

レポ[®] - Junior

Ready posture

レポの特徴である骨盤パッドと背張りベルトでのサポートに加え、シート張り座面にすることで底付き感の無い楽な坐り心地を実現しました。小学生くらいから小柄な成人の方まで幅広くお使いいただけます。



標準脚+転倒防止脚
オプション: ボメル・アームレスト



オプション: アームレスト
差し込み式テーブル



本体約5.5kg
※4

日本リハビリテーション工学協会主催
福祉機器コンテスト 2016 優秀賞受賞!

レポ[®] - NEXT

Ready posture

レポ - ジュニアでは成長対応が難しい方や成人の方まで幅広くお使いいただけます。

円背の方にも対応可能
腰痛がある方やデスクワークの方にも最適



オプション: アームレスト

本体約6kg
※4



足台付きキャスター脚
オプション:
ボメル・アームレスト・体幹パッド

※1. 最小値は座奥を一番狭く設定した際の座面先端から背カバーまで、最大値は座面全体の奥行き ※2. 転倒防止脚部はティルト不可 ※3. 骨盤パッドは、カバー内部に追加パッドを入れることで最小値を3cm程度小さくする事が出来ます。 ※4. オプションを含まない本体のみの重さ

○ 成長対応脚部(標準脚・転倒防止脚・固定輪・キャスター脚・足台付きキャスター脚の5種類)

前脚と後脚をそれぞれ5種類より、長さはロータイプ・ハイトタイプから選択
組合せや座面高はP7の一覧を参照



標準脚



転倒防止脚※1



固定輪※2



キャスター脚※3



足台付きキャスター脚
前脚のみ取付可

○ オプション (☆共通使用可)



ポメル



☆腰ベルト
★RepoCT-PB2



胸ベルト



アームレスト



テーブル上クッション:姿勢保持用具あーむとん使用(別売り)
オプション:アームレスト・テーブル



差し込み式テーブル※4
天板:Junior/60×45.5cm
NEXT/62×45.5cm
★CT-S/M/L



☆体幹パッド ※5



延長バックレスト※6



☆ヘッドレスト※7

完成用部品には
★マークが
付いています

交換パーツ
■替えカバー
背・座・体幹(TSのみ)
■各種成長対応脚部

追加加工
■防水加工
座面・ポメル
各パッド



足台(2cm・4cm)
※8




○ 選べるカバー：メッシュ生地 ※9

標準カラーは、背カバー：レポ-Juniorが4色・レポ-NEXTが2色・座面／骨盤パッドカバーはどちらも、チャコールグレー1色のみとなります。各カバーと胸ベルトが、オプションカラー対応可能です。


*オプションカラーは受注生産のため、納期が通常より掛かりますのでお問い合わせ下さい。

標準カラー

オプションカラー（追加料金あり）

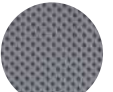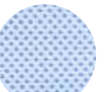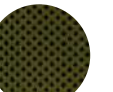背カバー			座・骨盤パッドカバー											
レポ-Junior4色		レポ-NEXT2色	レポ-Junior・NEXT共通 チャコールグレー 1色のみ											
														
ライラック	ミントグリーン	ミルクティ	黒	グレー	チャコールグレー	茶	黄	オレンジ	赤	うすピンク	ピンク	水色	青	オリーブグリーン
					織目調ビニールレザー (防水・抗菌仕様)  ダークグレー									
ミルクティ	紺	紺	緑	水玉 ※10										

レポに坐ると・・・

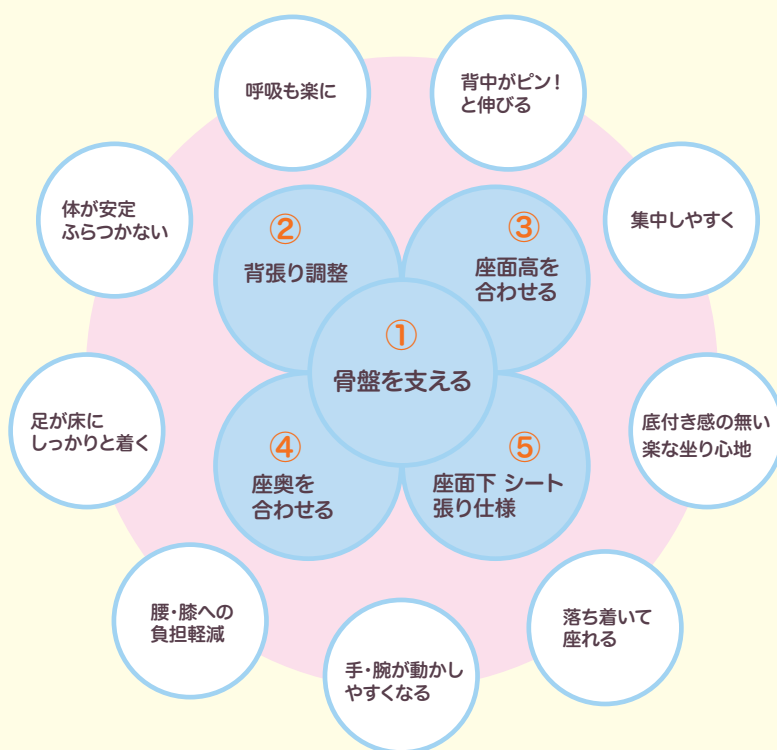


※1. 転倒防止脚部の構造上、ロータイプでご利用の場合のみ座面高が35～41cmに変更 ※2. 移動用での使用不可 ※3. キャスター脚はキャスターの特性上、4輪接地に多少の不安定感有り ※4. テーブル装着にはアームレストが必要 ※5. 体幹パッド仕様は、背シート形状が変わる為、本体購入後に体幹パッド仕様に変更する際、体幹パッド仕様用背シートも合わせて必要 ※6. 延長パイプ+カバーのセット ※7. ヘッドレストは延長バックレストにのみ取付可能(内部:ビーズクッション/ビーズ量は調整可能) ※8. 置き型タイプの為、椅子に固定不可、また足台の厚み次第で本体フレームに干渉する場合があります ※9. 洗濯可(洗濯ネット使用) ※10. 白地に直径5cmのカラフルな水玉となります

step.1 フレームを選ぶ

レポの注文時に決めること

◎ 標準仕様はフレームに、背クッション+座面+骨盤パッド が装着されています。

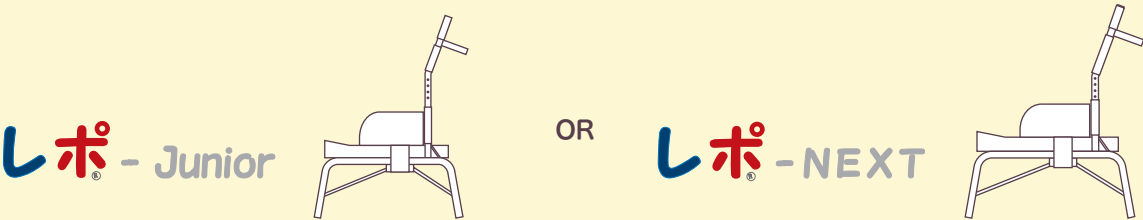


step.2 背力バーの色を選ぶ

◎ 6ページの選べる背力バー：メッシュ生地 一覧参照 【標準色（Junior4色・NEXT2色）orオプションカラー（追加料金有り）14色+ビニールレザー1色）】

step.3 成長対応脚部の種類と長さを選ぶ

◎ 成長対応脚部について・・・

- ◆下図参照：標準脚・転倒防止脚・固定輪・キャスター脚・足台付きキャスター脚の5種類
- ◆前脚と後脚の組み合わせは自由ですが、同じ長さタイプでの組み合わせになります。
- ◆組合わせる成長対応脚部の種類により前座面高が変わりますのでご注意ください。
- ◆組合わせ不可の脚部もありますので下表で確認して下さい。

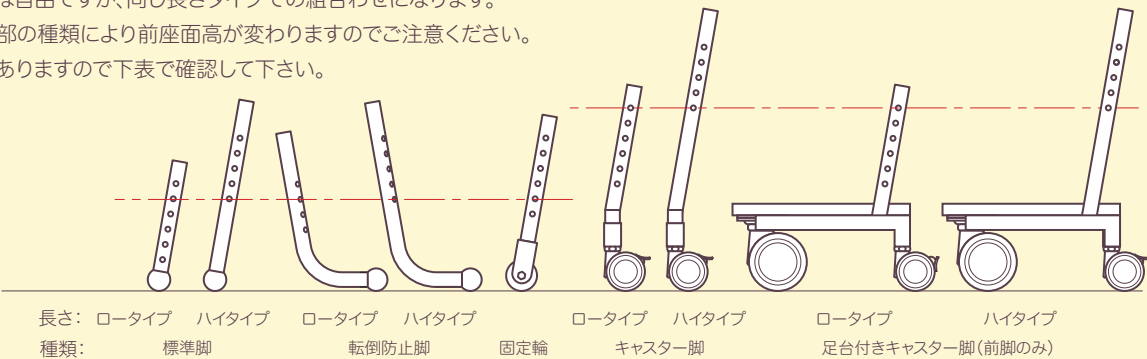

step.4 オプションを選ぶ

◎ 5ページのオプション一覧参照

前脚と後脚の組み合わせ一覧／数値は前座面高(単位:cm)

表の見方：【例】前脚／固定輪 ○ ・ 後脚／転倒防止脚(ロータイプ) △ の場合座面高は、
37～41cm になります。 ○ 使用可能 △ 成長対応穴の一部が使用不可 × 使用不可

Junior・NEXT ※数値はジュニアの前座面高 NEXTは数値に+2cm			後 脚						
			標準脚		転倒防止脚		固定輪	キャスター脚	
			ロータイプ	ハイトタイプ	ロータイプ	ハイトタイプ		ロータイプ	ハイトタイプ
前 脚	標準脚	ロータイプ	○ 31～41	×	△ 35～41	×	△ 37～41	×	×
		ハイトタイプ	×	○ 39～47	×	○ 39～47	△ 39～47	△ 41～47	×
	転倒防止脚	ロータイプ	○ 35～41	×	○ 35～41	×	△ 37～41	×	×
		ハイトタイプ	×	○ 39～47	×	○ 39～47	△ 39～47	△ 41～47	×
	固定輪		△ 37～41	△ 39～47	△ 37～41	△ 39～47	○ 37～47	×	×
	キャスター脚	ロータイプ	×	△ 41～47	×	△ 41～47	×	○ 41～51	×
		ハイトタイプ	×	×	×	×	×	×	○ 51～59
	足台付き キャスター脚 *足台から座面 上までの高さ	ロータイプ	×	△ 30～36	×	△ 30～36	×	○ 30～40	×
	ハイトタイプ	×	×	×	×	×	×	○ 40～48	

レポの特徴である **簡単調整で骨盤を支える** が学校椅子でも！
ポメル付きタイプとポメル無しタイプの2種類です。



学校椅子に取り付けた状態
※学校椅子はオプションになります。




ポメル有りタイプ



ポメル無しタイプ

取付方法は、椅子の背パイプ部分に専用クランプ **(A)** でプレート **(B)** を固定すれば完了！

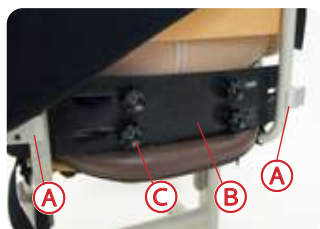

背もたれに開口部のある学校椅子に取り付け可能ですが、学校いすの形状やパイプ径により取付が出来ない場合がありますので事前にお確かめ下さい。


対応パイプ径 Φ19・Φ22

参考-上部写真で使用している学校いすの開口部寸法
開口高:13cm以上 開口部パイプ内幅:2本脚タイプ/約30cm程度・4本脚タイプ/約31.5cm程度
座面:付属のベルトにて装着します。

○ サポート

座奥の調整..... 学校でお使いの椅子の座奥に準じますが、背クッション内部に背追加パッドを入れることで座奥を狭く調整可能

骨盤パッド幅の調整... 背面のノブナット **(C)** で簡単に調節出来ます
骨盤パッドを体面側にスライドさせ、しっかりと骨盤をホールドし座位を安定させます

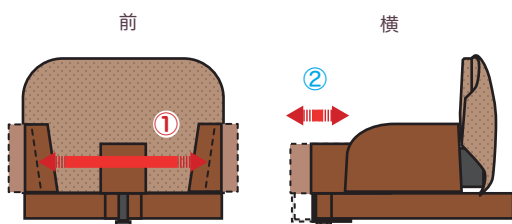

骨盤パッド調整幅(ポメルありなし共通)

① 23 ~ 34 cm ②ポメルは 5 cm程度調整が可能

※追加パッド使用時20cm〜 ※調整幅の最大値は取り付ける椅子により変わる可能性があります。

○ オプション



腰ベルト



足台 (2・4cm)

2本脚タイプにのみ固定可能

交換パーツ

■ファブリック(替えカバー)/
背・座・骨盤パッド

追加加工

■防水加工/座面・ポメル・骨盤パッド
■追加パッド/骨盤用・背面用



椅子 (S・L)

オプションの椅子について
メーカー取り寄せ品
付属のレンチで高さ調整が可能です。
座幅と座奥はS・Lサイズ共通
座幅36×座奥36×座面高S:26~34/L:30~46cm
※座面高を検討する際は、上記の寸法に
クッション厚(3.5cm)を足してご検討下さい。

○ 寸法

ポメル有り・ポメル無し共通			
前座面厚	骨盤パッド内幅	背シート厚	バックレスト高
約 5.5	約23~34	約1.5~3.5	約28

(単位:cm)


○ カバー

座・骨盤カバー
(ビニールレザー)
1色のみ



ブラウン


背カバー
(メッシュ)
1色のみ

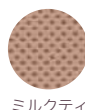

ミルクティ


■ 主要諸元表

単位:cm

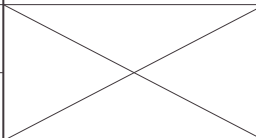					 ※ポメル・アームレストはオプションです		 ※アームレストはオプションです		 ※学校椅子はオプションです	
	レポ-Child		レポ-TS		レポ-Junior		レポ-NEXT		レポ-Seat	
①全幅	36				41		49		42	
②全奥行	35~40				約49~54		約58~63		43	
③全高	42~54				74~89		76~92		32	
④背幅	32				38		45		背クッション幅 42	
⑤前座面高	ベビータイプ	21	ベビータイプ	20	ロータイプ	31~41	ロータイプ	33~43		
	ロータイプ	24~28.5	ロータイプ	23~27.5						
	ハイトタイプ	28.5~33	ハイトタイプ	27.5~32	ハイトタイプ	39~47	ハイトタイプ	41~49		
⑥座面奥行	20~31				28~47		34~52		30~40	
⑦骨盤／体幹 パッド幅	骨盤	20~30	体幹	15~33	26~39		30~44		24~33	
⑧バックレスト高	24 延長バックレスト装着時(2段階) 47／52				45 延長バックレスト装着時(2段階) 65／70		45 延長バックレスト装着時 70		28	
重量	約4kg		約3kg		約5.5kg		約6kg		ポメル有りタイプ(本体のみ) 約3.6kg	
対応年齢(身長)目安	1~6才				7才~		140cm~		小学生から	

※上記寸法は生地やクッションの具合、調整等により数値は若干前後します。 ※①全幅は骨盤(体幹)パッドの調整幅を含まない寸法、また装着している脚部により寸法が変わります。②全奥行は装着している脚部により寸法が変わります。 ※⑥座面奥行の最小値は座奥を一番狭くした状態から背力バーまでの数値。最大値は座面全体の奥行になります。 ※重量はオプションを含まない標準仕様の本体のみの重さです。

■ 図面

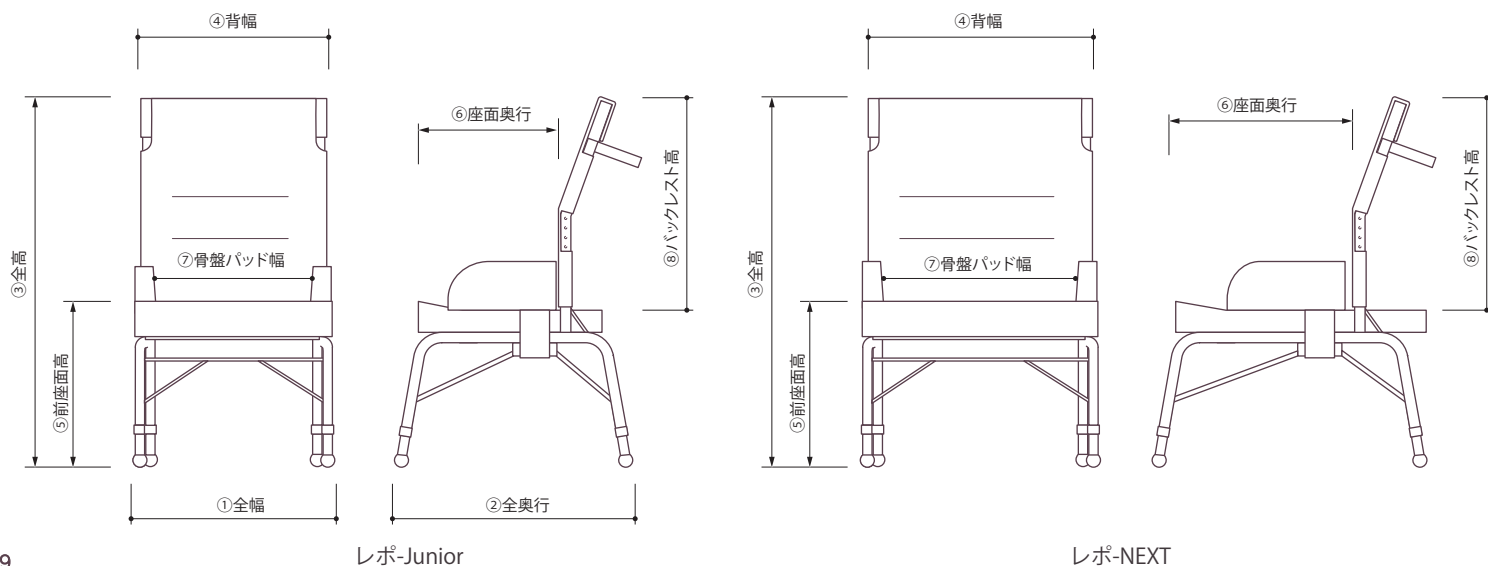

Repo-Junior・NEXT・Seat 注文書

①下記の枠内にご記入の上FAXにてご注文下さい。内容確認後、ご注文確認書のFAXをお送りします。

②標準カラーの追加料金はかかりません。③送料は、1台ごとに別途がかかります。

④脚部について注意事項があります。カタログをご確認下さい。⑤お振り込み確認後商品の準備を致します。

有限会社でく工房

〒196-0002 東京都昭島市拝島町2-11-10

TEL:042-542-7040 FAX:042-542-7078

ご希望の色を下記からお選びください。

	標準カラー	J	N	オプションカラー
背		4280	6280	
延長		4380	6380	
バックレスト		4281	6281	
		4381	6381	
骨盤パッド		4282	6282	
		4382	6382	
座面		4283	6283	
		4383	6383	
ボメル	チャコールグレーのみ	4284	6284	
		4384	6384	
胸ベルト		4285	6285	
		4385	6385	
体幹パッド		4286	6286	
		4386	6386	

	Junior	NEXT
標準カラー	ミントグリーン・ライラック 紺・ミルクティ	紺・ミルクティ
オプションカラー ※追加料金有り	黒・グレー・チャコールグレー・茶・黄色・オレンジ・赤 うすピンク・ピンク・水色・青・オリブグリーン・緑・水玉 ビニールレザー：ダークグレーのみ	

Repo-Junior・NEXT オプションカラーについて (Seatはオプションカラー非対応)

※ 骨盤パッド・体幹パッド・座面・ボメル：上面と側面等で色を変更することはできません。

※ 背・延長バックレストの背面はB面バイル（黒）のみとなります。色指定は出来ません。

※ 胸ベルトのバックル・ベルト部は黒のみの対応となります。

※ オプションカラーは、完全受注生産となるため納期が1ヶ月程度かかります。状況によりさらにお時間をいただくこともございます。

体幹パッド仕様について

※ 体幹パッド仕様の場合、背カバーの形状が変わります。本体ご購入後に体幹パッドを追加でご注文いただく際は、背カバーとセットになります。

	No.	品 名		○印
		Repo-Seat		
本体	5200	ボメルなし	ブラウン ミルクティ (茶系)	
	5300			
	5201	ボメルあり		
	5301			
オプション	5222	腰ベルト	★RepoCT-PB2	
	5322			
	5230	椅子	S	
	5231		L	
	5236	足台	2cm	
	5336			
	5237		4cm	
	5337			
	5240	防水加工	座面	
	5241		ボメル	
	5242		骨盤パッド	
	5250	替えカバー 背：メッシュ/ミルクティ 座・骨盤・ボメル： ビニールレザー/ブラウン	背カバー	
	5350		座カバー	
	5251		ボメルなし 座カバー	
	5351		ボメルあり 骨盤パッド	
	5252		カバー	
	5352		ボメルカバー	
	5253			
	5353			
	5254			
	5354			
	5260	背追加パッド		
	5360			

ユーザー名：

ご注文者と送付先が違う場合にご記入下さい。

お名前			
住所			
TEL	FAX		

3304		J	N	品 名 (完成用部品には★マーク)						
		4203	6205	Repo-Junior			Repo-NEXT			
		4303	6305							
脚 部 (2 本 セ ッ ト)	前脚と後脚の種類をお選び下さい								○印	
									前	後
	4263	6263	標準脚	ロータイプ						
	4363	6363		ハイタイプ						
	4264	6264								
	4364	6364	転倒防止脚	ロータイプ						
	4265	6265		ハイタイプ						
	4365	6365								
	4266	6266	固定輪							
	4366	6366								
	4234	6267	足台付き キャスター脚	ロータイプ						
	4334	6367		ハイタイプ						
	4272	6272								
	4372	6372	キャスター脚	ロータイプ						
	4273	6273		ハイタイプ						
	4373	6373								
4270	6270	キャスター脚	ロータイプ							
4370	6370		ハイタイプ							
4271	6271									
4371	6371									
オ プ シ ョ ン	4221	6221	ボメル							
	4321	6321								
	4222	6222	腰ベルト		★RepoCT-PB2					
	4322	6322								
	4223	6223	胸ベルト							
	4323	6323								
	4230	6230	アームレスト							
	4330	6330								
	4245	6245	差し込みテーブル		★CT-S/M/L					
	4345	6345								
	4232	6232	延長バックレスト							
	4332	6332								
	4233	6233	ヘッドレスト							
	4333	6333								
	4236	6236	置型足台		2cm					
	4336	6336			4cm					
	4237	6237								
	4337	6337								
	4238	6238	体幹パッド		本体同時購入					
	4338	6338			本体別購入					
	4239	6239								
	4339	6339								
	4240	6240	防水加工		座面					
	4241	6241			ボメル					
	4242	6242			骨盤					
	4243	6243			体幹パッド					
	4250	6250	替 え カ バ ー	標準カラー	背					
	4350	6350			座面					
	4251	6251			骨盤パッド					
	4351	6351			体幹パッド					
4252	6252	ボメル								
4352	6352									
4253	6253									
4353	6353									
4254	6254	オプ シ ョ ン カ ー		背						
4354	6354			座面						
4255	6255			骨盤パッド						
4355	6355			体幹パッド						
4256	6256			ボメル						
4356	6356									
4257	6257									
4357	6357									
4258	6258	ボメル								
4358	6358									
4259	6259									
4359	6359									

お名前			
住所			
TEL	FAX		



デザインや仕様は、予告なく変更することがあります。 2304



有限会社 でく工房

〒196-0002 東京都昭島市拝島町2-11-10 TEL : 042-542-7040 / FAX : 042-542-7078
✉ deku.product@gmail.com ホームページ : <https://www.deku-kobo.com>