



坐るをサポートする椅子 **幼児用**

レポ-Child ・ レポ-TS ・ レポ-Seat



support 1

背中の中の張りベルト

ベルトの張り方で骨盤の後傾を防ぎ腰から背中中のS字カーブを楽に維持!



support 2

骨盤を左右から支えるパッド

骨盤を支えることで無理なく背筋がピンツ!とします



体重の1/10もある頭を支えるのは大変

落ち着いて坐れるのはなぜ ?


レポのサポート機能



support 3

座面奥行が調整できる

レポの座面は無段階調整座面が前後に簡単に動かせます。

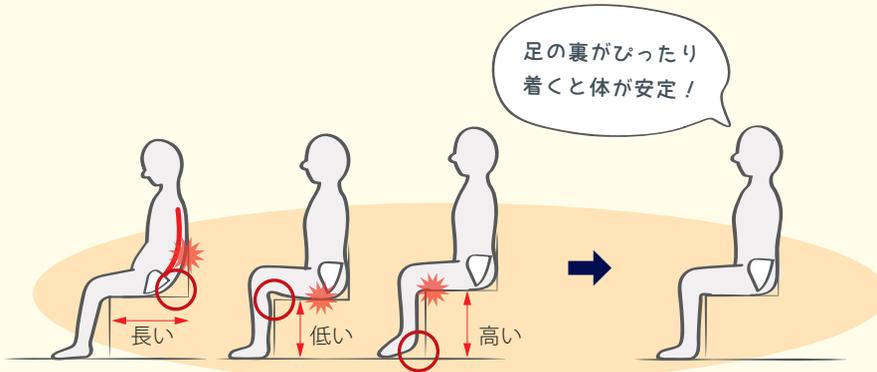

奥行きや高さが合わないと、腰や腿に負担が...

support 4

座面の高さが調整できる

各種成長対応脚部を使用
成長に応じて脚部のみの交換も可能
※一部例外有り

サポートに加え、レポが選ばれる 4つの理由



point
1

工具がなくても大丈夫!

ノブボルトやマジックテープで
だれでも簡単に調整が可能

※TSとSeatは一部、付属工具での取付
及び調整があります。



point
2


学校や施設でも 使いやすい軽量フレーム

移動も楽な軽量フレームを使用

point
4

簡単に脱着できるカバー

背・座面・骨盤パッド・ポメル(オプション)
すべてのカバーが簡単に外せて洗濯も楽々

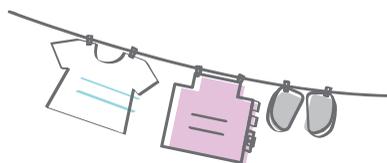

point
3

オプションが豊富

ポメルや昇降装置
各種ベルト・テーブルなど

コラム

骨盤の適切な保持で子どもの生活が改善

作業療法士 佐藤 直

どうしてうまく坐れないの?

立って歩けても知的な遅れや発達障害を示す子どもの中には、椅子に坐るのが苦手な子がいます。

椅子に坐ると、とたんに背中が丸くなり、お尻が前にずれ出すので、椅子や机に手を置いて姿勢を保持している子や、椅子からずり落ちてしまう子、立ち上がってしまう子もいます。また、足を組んだり、椅子の上であぐらをかいたりする子もいます。それで「姿勢が悪い!」と、たびたび注意を受けてしまいます。

安定した坐位が継続できないのは、筋緊張の低さが考えられます。坐る時の様子を見てみると坐ったとたんに骨盤が後ろに倒れています。骨盤を起こしておく力が弱いからです。



こうしたらいい!

感覚調整障害からくる注意集中力の弱さや視覚や知覚の問題などもありますが、まずは坐るための環境を整えてあげることが大事だと考えました。

骨盤を安定させることで、安定した坐位は得られます。骨盤を後ろから適切に支えるだけでなく側方からのサポートも大事です。さらに股が大きく開いてしまうのを防ぎ、足底が床にきちんと着けるようにすることも必要です。

こんなことが実現できる椅子が必要だと考え、“でく工房”に依頼しました。

手もうまく使えた



試作品を通園施設や特別支援学校(小学部から高等部まで)で試し、何度か改良を重ねました。

その結果、安定して坐ることができるようになり集中力も改善しました。手が上手に使えるようになった子や食事が上手になった子もいます。

椅子にうまく坐れないのは、その子の問題だけではなく、椅子がその子に合っていなかったからともいえます。椅子に、うまく坐るためには、骨盤を適切に支えることが大事だということを、この“レポ”を通して再認識しました。





自分サイズに合わせてると良いこといっぱい!



坐っていても、背中がピン!とのびた姿勢に

左右のパッドと背張り調整でグッと骨盤回りをサポートすると体も心もゆったり落ちつく

左右のパッドで骨盤を支えるとふらつき防止に


横

座面が前後に動く!

マジックテープ固定のため簡単に剥がせて動かせます。

20~31cm ※2

座面高(1.5cm間隔)

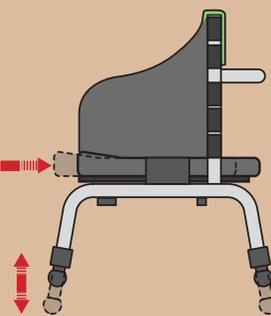

脚の高さ前後で変ティルト

合わせ方

共通

- ① 成長対応脚部で座面高を合わせる
- ② 座面を前後し、奥行きを合わせる



こどもの成長はあっという間。

少しでも長く使えるよう、こどもの成長に合わせて座面高・座奥骨盤(体幹)パッド幅が簡単に調整できます。

レポ - Child

Ready posture

レポ-チャイルドは、骨盤パッドと背張り調整で骨盤をしっかり支えます。

★RepoCT-F1

レポと一緒にあそびましょう！

Childは骨盤パッド



本体約4kg ※1

TSは体幹パッド



本体約3kg ※1

レポ - TS

Ready posture

レポ-チャイルドではサポートが少し足りないと感じる方に。骨盤から体幹部までを中心に支えます。体幹パッドは座面からの高さ、幅、角度も可変し、「坐る」をよりサポートします。

※1. オプションを含まない本体のみの重さ ※2. 最小値は座奥を一番狭く設定した際の座面先端から背カバーまで、最大値は座面全体の奥行き ※3. 転倒防止脚部はティルト不可 ※4. 20cm(追加パッド使用)~30cm(追加パッド無し) ※5. 上下左右に可動するため目安数値

レポ-Child


前

レポ-TS


角度可変も！

後


マジックテープで簡単調整！

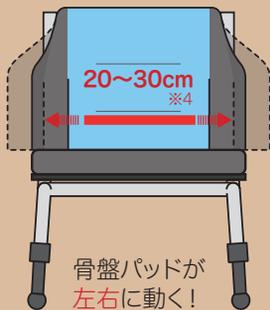

骨盤パッドが左右に動く！

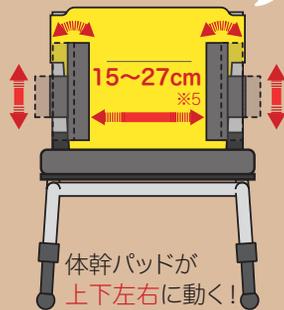

体幹パッドが上下左右に動く！

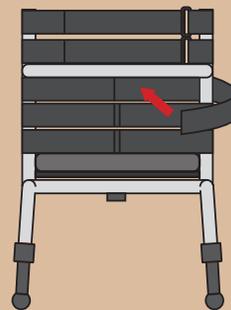

左図：Child TSは背張り調整ベルトの形状がイラストとは異なります。

ChildとTSの大きな違いは左右のパッド！

レポ-Child・・・③ 骨盤をパッドで左右から支える
レポ-TS・・・③ 体幹

共通

④ 背張り調整ベルトで腰から背中のS字カーブを支える

○ 成長対応脚部(標準脚・転倒防止脚・固定型足台付脚の3種類)

前脚と後脚をそれぞれ3種類より、長さはロータイプ・ハイタイプから選択
組合せや座面高はP7の一覧を参照

※ベータタイプはフレームに直に脚キャップをするため成長対応は出来ません。

完成用部品には
★マークが
付いています



標準脚



転倒防止脚
※1



固定型足台付脚 ※2

前脚のみ取付可
(ハイタイプのみ)

★RepoCT-FF1

○ オプション

延長バックレスト※3

高さ2段階調整
用途に合わせて選べる2タイプ
・標準タイプ
・肩ベルト用タイプ
*肩ベルト用はマジックテープ(B面)付き

アームレスト

★RepoCT-A1

高さ7段階調整

腰ベルト

★RepoCT-PB2



ヘッドレスト※4

内部はビーズで
増減可能

胸ベルト

★RepoCT-CB1

用途に合わせて選べる2タイプ
・メッシュタイプ
・B面パイル(黒のみ)タイプ
*完成用部品はメッシュタイプのみ



NEW 肩ベルト

肩ベルトの取り付けには、延長
バックレスト/肩ベルト用と胸
ベルト/B面パイルタイプが必
要です

ポメル(内転防止)

★RepoCT-P1

前滑りを防ぎます

置き型足台※5 (2cm・4cm)

2種類の厚みを重ねる
ことで高さを調整



差込み式テーブル※6 (天板:58×45.5cm)

★CT-Sプラス

昇降装置 - UP/DOWN ★UD-C1701

必要な時だけレポを乗せればダイニングテーブル等高さのある
テーブルでも使用可能に。場所をとらないコンパクトサイズ!



ダイニングテーブル
でもレポが活躍♪

交換パーツ

■ 替えカバー

背・座・体幹(TSのみ)

■ 各種成長対応脚部

追加加工

■ 防水加工

座面・ポメル・各パッド

前座面高47.5~57.5cm
(2cm間隔の5段階)



レポ本体+UP/DOWN
装着イメージ

レポのフレームは **ワンサイズ** 脚部を選ぶことで成長に応じて変えられる座面高!

ベビータイプ
(高さ固定)



標準脚/ロータイプ



標準脚/ハイタイプ



*前後脚とも標準脚を使用した際の目安数値
*TSは座面ベース板の厚みがChildと異なる為上記から-1cm引いた数値になります。

○ 選べる背カバー:メッシュ生地 ※7

標準カラーは、下図参照。各カバーと胸ベルト(メッシュタイプのみ)がオプションカラー対応可能です。
*オプションカラーは受注生産のため、納期が通常より掛かりますのでお問い合わせ下さい。

標準色について



標準カラー



オプションカラー(追加料金あり ※8)



※1.転倒防止脚部の構造上、ロータイプをご利用の場合のみ座面高が26~27.5cmに変更 ※2.クランプ金具を使用し脚部に足台を固定、足台専用転倒防止脚部(前側のみ)とのセット ※3.延長パイプ+カバーのセット ※4.ヘッドレストは延長バックレストにのみ取付可能(内部:ビーズクッション/ビーズ量は調整可能) ※5.置き型タイプの為椅子に固定不可、また前脚が転倒防止脚の場合、脚部が足台に干渉するため取付不可 ※6.テーブル装着にはアームレストが必要 ※7.洗濯可(洗濯ネット使用) ※8.追加料金は1箇所につき掛かります。Child背カバーの体面側と外側をオプションカラーから選択された場合、追加料金は2倍掛かります ※9.白地に直径5cmのカラフルな水玉模様


step.1 フレームを選ぶ

レポの注文時に決めること

◎ 標準仕様はフレームに、背クッション+座面+骨盤(体幹)パッドが装着されています。

骨盤まわりを支えたいなら


レポ® - Child

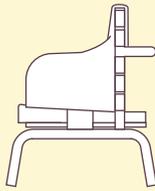

OR

体幹を支えたいなら

レポ® - TS

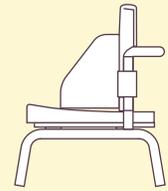


step.2 背カバーの色を選ぶ

◎ 6ページの選べる背カバー:メッシュ生地 一覧参照 【標準色4色orオプションカラー(追加料金有り)14色+ビニールレザー1色】

step.3 成長対応脚部の種類と長さを選ぶ

◎ 成長対応脚部について…

- ◆ 下図参照:標準脚・固定型足台付脚・転倒防止脚の3種類(※座面高20cm固定のベビータイプも有り)
- ◆ 前脚と後脚の組み合わせは自由ですが、同じ長さ(ロータイプ・ハイタイプ)での組み合わせになります。
- ◆ 組み合わせる成長対応脚部の種類により前座面高が変わりますのでご注意ください。

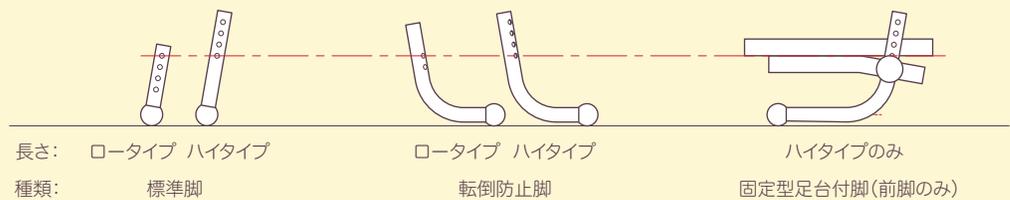

step.4 オプションを選ぶ

◎ 5ページのオプション一覧参照

前脚と後脚の組み合わせ一覧/数値は前座面高(単位:cm)

表の見方:【例】前脚/標準脚(ロータイプ) ○ ・後脚/転倒防止脚(ロータイプ) ○ の場合座面高は、
27~28.5cm になります。

○ 使用可能 △ 成長対応穴の一部が使用不可 × 使用不可

Child・TS *TSは座面ベース板の厚みが異なるため表の数値より-1cm		後脚					
		ベビータイプ	標準脚		転倒防止脚		
			ロータイプ	ハイタイプ	ロータイプ	ハイタイプ	
前脚	ベビータイプ (フレームにキャップのみ)	○ 21	×	×	×	×	
	標準脚	ロータイプ	×	○ 24~28.5	×	△ 27~28.5	×
		ハイタイプ	×	×	○ 28.5~33	×	○ 28.5~33
	転倒防止脚	ロータイプ	×	○ 27~28.5	×	○ 27~28.5	×
		ハイタイプ	×	×	○ 28.5~33	×	○ 28.5~33
	固定型足台付脚※	ハイタイプ	×	×	△ 9~22.5 ※	×	△ 9~22.5 ※

※固定型足台付脚の座面高は足台から座面の高さになります。固定型足台はクランプ金具を使用します。レポ本体脚部にも取り付け可能なため、上記最小数値は本体側に取り付けられた場合の数値、最大値は固定型足台用脚側に取り付けられた場合の数値となります。

しぽ® - Seat

Ready posture

レポの特徴である **簡単調整で骨盤を支える** が学校椅子でも可能になりました。
ポメル付きタイプとポメル無しタイプの2種類です。



学校椅子に取り付けた状態
※学校椅子はオプションになります。




ポメル有りタイプ



ポメル無しタイプ

取付方法は、椅子の背パイプ部分に専用クランプ **A** でプレート **B** を固定すれば完了!

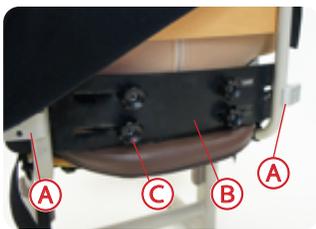

背もたれに開口部のある学校椅子に取り付け可能ですが、学校いすの形状やパイプ径により取付が出来ない場合がありますので事前にお確かめ下さい。

対応パイプ径 $\phi 19 \cdot \phi 22$

参考-上部写真で使用している学校いすの開口部寸法


開口高:13cm以上 開口部パイプ内幅:2本脚タイプ/約30cm程度・4本脚タイプ/約31.5cm程度

座面:付属のベルトにて装着します。

○ サポート

座奥の調整..... 学校でお使いの椅子の座奥に準じますが、背クッション内部に背追加パッドを入れることで座奥を狭く調整可能

骨盤パッド幅の調整... 背面のノブナット **C** で簡単に調節出来ます
骨盤パッドを体面側にスライドさせ、しっかりと骨盤をホールドし座位を安定させます

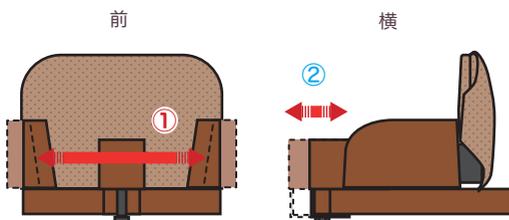

骨盤パッド調整幅(ポメルありなし共通)

① 23 ~ 34 cm ②ポメルは 5 cm程度調整が可能

※追加パッド使用時20cm~ ※調整幅の最大値は取り付ける椅子により変わる可能性があります。

○ オプション



腰ベルト



足台(2・4cm)

2本脚タイプにのみ固定可能

交換パーツ

■ファブリック(替えカバー)/
背・座・骨盤パッド

追加加工

■防水加工/座面・ポメル・骨盤パッド
■追加パッド/骨盤用・背面用

○ 寸法

ポメル有り・ポメル無し共通			
前座面厚	骨盤パッド内幅	背シート厚	バックレスト高
約 5.5	約23~34	約1.5~3.5	約28

(単位:cm)

○ カバー

座・骨盤カバー
(ビニールレザー)
1色のみ



背カバー
(メッシュ)
1色のみ



椅子(S・L)

オプションの椅子について
メーカー取り寄せ品

付属のレンチで高さ調整が可能です。

座幅と座奥はS・Lサイズ共通

座幅36×座奥36×座面高S:26~34/L:30~46cm

※座面高を検討する際は、上記の寸法に

クッション厚(3.5cm)を足してご検討下さい。


■ 主要諸元表

単位:cm

										
	レポ-Child		レポ-TS		レポ-Junior <small>※ポメル・アームレストは、オプションです</small>		レポ-NEXT <small>※アームレストは、オプションです</small>		レポ-Seat <small>※学校椅子は付属しません</small>	
①全幅	36				41		49		42	
②全奥行	35~40				約49~54		約58~63		43	
③全高	42~54				74~89		76~92		32	
④背幅	32				38		45		背クッション幅 42	
⑤前座面高	ベビータイプ	21	ベビータイプ	20	ロータイプ	31~41	ロータイプ	33~43	X	
	ロータイプ	24~28.5	ロータイプ	23~27.5	ハイトタイプ	39~47	ハイトタイプ	41~49		
	ハイトタイプ	28.5~33	ハイトタイプ	27.5~32						
⑥座面奥行	20~31				28~47		34~52		30~40	
⑦骨盤/体幹 パッド幅	骨盤	20~30	体幹	15~33	24~36		30~44		24~33	
⑧バックレスト高	24 延長バックレスト装着時(2段階) 47/52				45 延長バックレスト装着時(2段階) 65/70		45 延長バックレスト装着時 70		28	
重量	約4kg		約3kg		約5.5kg		約6kg		ポメル有りタイプ(本体のみ) 約3.6kg	
対応年齢(身長)目安	1~6才				7才~		140cm~		小学生から	

※上記寸法は生地やクッションの具合、調整等により数値は若干前後します。 ※①全幅は骨盤(体幹)パッドの調整幅を含まない寸法、また装着している脚部により寸法が変わります。②全奥行は装着している脚部により寸法が変わります。 ※⑥座面奥行の最小値は座奥を一番狭くした状態から背力バーまでの数値。最大値は座面全体の奥行になります。 ※重量はオプションを含まない標準仕様の本体のみの重さです。

■ 図面

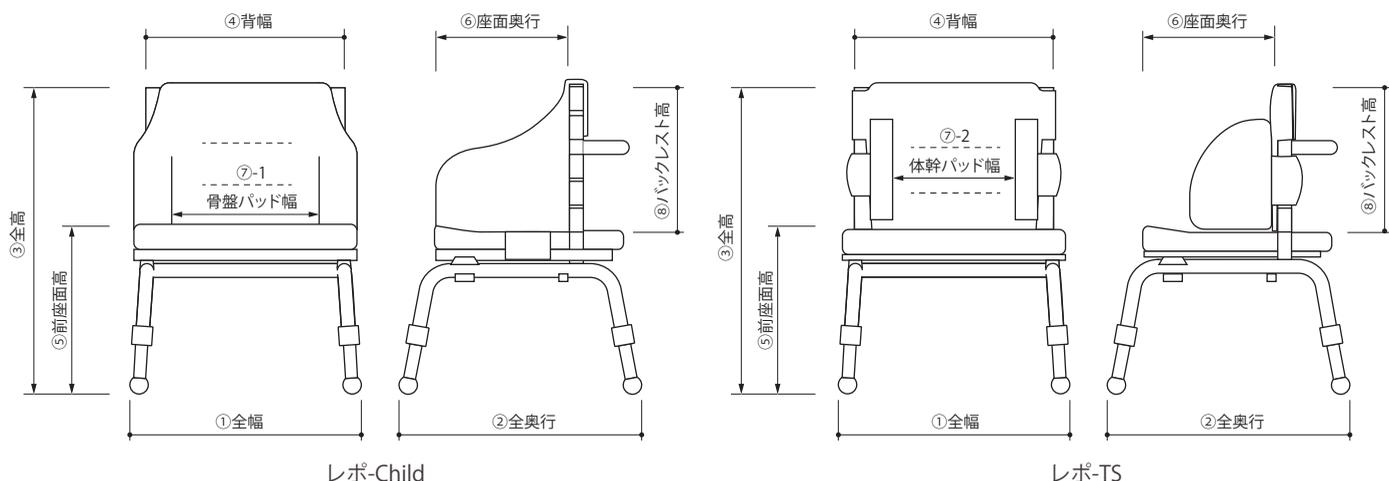

Repo-Child・TS・Seat 注文書

①下記の枠内にご記入の上FAXにてご注文下さい。内容確認後、ご注文確認書のFAXをお送りします。
 ②標準カラーの追加料金はかかりません。③送料は、1台ごとに別途かかります。
 ④脚部について注意事項が有ります。カタログをご確認下さい。⑤お振り込み確認後商品の準備を致します。

有限会社でく工房

〒196-0002 東京都昭島市拝島町2-11-10
TEL:042-542-7040 FAX:042-542-7078

ご希望の色を下記からお選びください。


3304	C	T	品名 (完成用部品には★マーク)		
	2205 2305	3205 3305	Repo-Child ★RepoCT-F1		Repo-TS
脚部 (2本セット)	前脚と後脚の種類をお選び下さい			○印	
				前	後
	2262	3262	ベビータイプ	※成長対応脚無し (キャップのみ)	
	2263	3263	標準脚	ロータイプ	
	2363	3363		ハイタイプ	
	2264	3264			
	2364	3364	転倒防止脚	ロータイプ	
	2265	3265		ハイタイプ	
	2365	3365			
	2266	3266			
	2366	3366			
	2267	3267	固定型足台付脚	ハイタイプのみ	
	2367	3367	★RepoCT-FF1		
	2221	3221	ポメル	★RepoCT-P1	
	2321	3321			
2222	3222	腰ベルト	★RepoCT-PB2		
2322	3322				
2223	3223	胸ベルト	★RepoCT-CB3		
2323	3323	メッシュタイプ			
2230	3230	アームレスト	★RepoCT-A1		
2330	3330				
2238	3238	差し込みテーブル	★CT-Sプラス		
2338	3338				
2232	3232	昇降装置 UP/DOWN	★UD-C1701		
2332	3332				
2233	3233	延長バックレスト			
2333	3333				
2224	3224	肩ベルトセット	①肩ベルト		
2324	3324		②胸ベルト		
2225	3225		B面バイルタイプ		
2325	3325	③延長バックレスト			
2226	3226	*①②③それぞれ単品でのご注文も可能です		セット	
2326	3326	肩ベルト用。(取付付き)			
2234	3234	ヘッドレスト (ピースタイプ)			
2334	3334				
2236	3236	置型足台	2cm		
2336	3336		4cm		
2237	3237				
2337	3337				
2240	3240	防水加工	座面		
2340	3340		ポメル		
2241	3241				
2242	3242	骨盤・体幹パッド			
2250	3250	替えカバ	背		
2350	3350		座面		
2251	3251		体幹パッド (TSのみ)		
2351	3351		ポメル		
2252	3252		背		
2352	3352		座面		
2253	3253		体幹パッド (TSのみ)		
2353	3353		ポメル		
2254	3254		背		
2354	3354		座面		
-	3255	体幹パッド (TSのみ)			
-	3355	ポメル			
2255	3255				
2355	3355				

		標準カラー		オプションカラー	
背	A	2270	3270	チャコールグレーのみ	
		2370	3370		
	B	2271	-		
		2371	-		
座面	2272	3272			
	2372	3372			
体幹パッド (TSのみ)	-	3271			
	-	3371			
ポメル	2273	3273			
	2373	3373			
胸ベルト	2274	3274			
	2374	3374			
延長 バックレスト	2275	3275			
	2375	3375			

標準カラー	ミントグリーン・ライラック・黄色・水色
オプションカラー	黒・グレー・チャコールグレー・ミルクティ・茶・オレンジ・赤 うすピンク・ピンク・青・紺・オリーブグリーン・緑・水玉
※追加料金有り	ビニールレザー：ダークグレーのみ ※Child背カバー不可

Repo-Child・TS オプションカラーについて (Seatはオプションカラー非対応)

- ※ 背カバーのA・B両面共にオプションカラーを選択した場合、追加料金は2倍となります。
- ※ 背カバーのB両面指定があるのはChildのみとなります。
- ※ 座面・ポメル：上面と側面で色を変更することはできません。
- ※ ビニールレザー：Childの背カバーの対応は不可となります。
- ※ 延長バックレストの背面はB面バイル(黒)のみとなります。色指定は出来ません。
- ※ 胸ベルトのバックル・ベルト部は黒のみの対応となります。
- ※ 肩ベルト及び胸ベルトB面バイルタイプは黒のみとなります。色指定は出来ません。
- ※ オプションカラーは、完全受注生産となるため納期が1ヶ月程度かかります。状況によりさらにお時間をいただくこともございます。

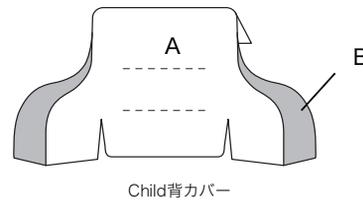

Child背カバー

※オプションカラーを選択する際に、A面とB面指定があるのはChildのみです。TSはA面のみ。

	No.	品名		○印	
		Repo-Seat			
本体	5200	ポメルなし	ブラウン		
	5300				
	5201 5301	ポメルあり	ミルクティ (茶系)		
オプション	5222 5322	腰ベルト			
	5230	椅子	s		
	5231		L		
	5236 5336 5237 5337	足台	2cm		
			4cm		
	5240		座面		
	5241		防水加工	ポメル	
	5242			骨盤パッド	
	5250 5350			背カバー	
	5251			座カバー	
	5351	替えカバー		ポメルなし	
	5252	背：メッシュ/ミルクティ		座カバー	
	5352	座・骨盤・ポメル：		ポメルあり	
	5253	ビニールレザー/ブラウン		骨盤パッド	
	5353			カバー	
5254 5354			ポメルカバー		
5260	背追加パッド				
5360					

ユーザー名：

お名前	
住所	〒
TEL	FAX

ご注文者と送付先が違う場合は、必ず注文時にお知らせ下さい。



デザインや仕様は、予告なく変更することがあります。 2304



有限会社 でく工房

〒196-0002 東京都昭島市拝島町2-11-10 TEL : 042-542-7040 / FAX : 042-542-7078
✉ deku.product@gmail.com ホームページ : <https://www.deku-kobo.com>